

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 22/01/2018
	ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE SUCCIÓN NUEVA GENERACIÓN	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivos para instalar, conectar y adecuar el sistemas cerrado de recolección de desechos de succión.

COMPOSICIÓN:

Soporte de Pared para Canister (Platos)	Plástico	11,5 x 11,5 cm.
Tubo Tandem para Liners	PVC	50 cm. Largo 1,2 cm. Ø
Soporte para 4 Canister (Atril)	Plástico	89 cm. alto, Ø base 55cm
Nuevo Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 1.300cc	Polietileno	13 cm. Ø x 16.5 cm. alto
Nuevo Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 1.800cc	Polietileno	13 cm. Ø x 22.0 cm. alto
Nuevo Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 3.200cc	Polietileno	13cm. Ø x 37.5 cm. alto

Ventajas de los nuevos recipientes rígidos reusables 1.300cc, 1.800cc, 3.200cc:

- Incluye código de colores para los tres tamaños:
AMARILLO: 1300 C.C.
AZUL: 1800 C.C.
VERDE: 3200 C.C.
- El liner es compatible únicamente con el Canister de la misma referencia.
- El nuevo diseño permite un mayor sello entre la bolsa Liner y el Canister
- El Canister cuenta con llave para abrir o cerrar la succión, facilitando su adaptación a cualquier sistema de vacío.
- Sin látex.
- Escala de medición visible para cuantificar exactamente el contenido del liner.

PRESENTACIONES COMERCIALES: Caja de cartón corrugado diferentes tamaños.

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas
71-005	Soporte para 4 Canister (Atril)	1und/caja	93x16x49
71-001	Soporte de Pared para Canister (Platos)	200und/caja	51x29x24
71-011	Tubo Tandem para Liners	50und/caja	56x18x36
71-313C	Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 1.300cc	20und/caja	70x36x42
71-318C	Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 1.800cc	20und/caja	70x36x53
71-332C	Recipientes Rígidos Reusables (Canister), 3.200cc	12und/caja	82x36x42

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Para instalar y adecuar de la mejor manera los accesorios para coleccionar los desechos fluidos en forma segura y rápida siga las siguientes instrucciones:

1. Retire el Canister reusable del soporte de pared o del trípode, árbol o araña.
2. Tome el Liner flexible GHC del color correspondiente al Canister y estírelo hasta que tome la forma cilíndrica, para facilitar su introducción en el Canister con las tapas de los puertos abiertas.
3. Apoye el Canister en una superficie firme e introduzca el Liner GHC presionando la tapa azul hasta escuchar el "clik" del ajuste de la tapa en el Canister. Tenga en cuenta que la nueva generación de Liners y Canister vienen con un código de colores y estos deben coincidir en el Liner y el Canister.
4. Tape el puerto presionando con fuerza las tapas de estos en el Liner GHC hasta escuchar el "clik".
5. Conecte la manguera azul reforzada del Canister al puerto de Vacum, donde está el filtro de color blanco, ajústelo bien.
6. Deslice el Canister reusable con el Liner GHC bien ajustado en el soporte de pared o en el trípode, árbol o araña.
7. Conecte el látex o manguera que proviene del sistema de succión en el conector blanco ubicado en la parte inferior del brazo del Canister.
8. Retire el codo o conector de color correspondiente y conecte el látex o manguera que va al paciente, luego coloque el codo de nuevo en el puerto de paciente.
9. Si el liner GHC queda colapsado dentro del Canister abra la succión y tape con el dedo la salida del codo o conector durante 4 seg. y destape, así se expande el liner fácilmente.
10. En el brazo del Canister encuentra una llave de color blanco que indica si está abierta o cerrada la succión con flechas que indican ON y OFF.

OBSERVACIONES: Deben permanecer limpios y desinfectados, libre de gérmenes.



Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net