

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 24/10/17
	Nuevo Sistema de Recolección de Fluidos Hospitalarios	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCIÓN: Recipiente cilíndrico, flexible, cerrado, desechable, destinado para el desecho de fluidos hospitalarios y para la recogida y aspiración de fluidos médicos. El nuevo diseño reduce al máximo el riesgo de contaminación por contacto o manipulación inadecuada de fluidos orgánicos dentro del ambiente hospitalario. Contiene una tapa adherida, con tres tomas de diferentes diámetros para conexión de vacío, succión y puerto para TANDEM. Cuenta con un filtro de eficiencia de filtración del 99,5% contra *Estafilococo Áureo*, atrapa microorganismos en forma de aerosol. Para usar en recipiente rígido reutilizable. Su nuevo diseño está asociado a un Canister Rígido exclusivo, diferenciado por un código de color por referencia, esto permite una adaptación exclusiva y robusta al sistema de succión. El puerto paciente cuenta con una válvula anti retorno, lo que permite el paso de fluidos hacia el interior del Liners, pero no permite que este fluido se devuelva y contamine la red.

COMPOSICIÓN:

Recipiente flexible	Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)	11cm. diam, 16, 21.5 y 30 cm. de alto
Tapa adherida	Polietileno de Alta densidad (HDPE+POE), 4 tomas	14cm. diam, 1 cm. de alto
Conector universal en ángulo (codo de color de la referencia del liner)		

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Capacidades:	1.300 cc.	Medidas:	Alto 16.0 cm., diam 11.0 cm.
	1.800 cc.		Alto 21.5 cm., diam 11.0 cm.
	3.200 cc.		Alto 30.0 cm., diam 11.0 cm.

Item	Descripción	Empaque
71-313	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 1.300 cc	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado
71-313S	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 1.300 cc con Solidificante	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado
71-318	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 1.800 cc	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado
71-318S	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 1.800 cc con Solidificante	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado
71-332	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 3.200 cc	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado
71-332S	Nueva Bolsa de Recolección Fluidos (Liners) 3.200 cc con Solidificante	1und/bolsa, 50bolsas/corrugado

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Aspiración, recogida y desecho de fluidos médicos, en quirófanos, salas de exploración, salas de pacientes y en otras instalaciones, destinados a ser desechados.

Instrucciones de uso: **1)** Acople el cilindro en el recipiente externo encajándolo en su lugar, de forma que la tapa quede ajustada firmemente en todo el radio de dicho recipiente. **2)** Conecte el tubo de vacío situado en el cuello del soporte del recipiente externo al puerto "Vacuum" del cilindro desechable o flexible. **3)** Conecte el tubo de paciente al puerto "Patient" **5)** Cuando se utiliza un solo tarro, el puerto "Tandem" y el "Conducto de vertido" deben estar tapados.

PRECAUCIONES: Para un solo uso, No reutilice ni intente esterilizar el dispositivo, No está recomendado para drenaje pleural, La resistencia al vacío se ha probado a 27 pulgadas Hg, No sobrepase dicha presión, Los cilindros flexibles solo debe utilizarse con los recipientes externos del tamaño adecuado. No intercambie los cilindros y recipientes externos con los de otras marcas.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, no usar si está roto o dañado.



LINER FLEXIBLE

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net